



## gigasept® FF new

Speciální kapalný dezinfekční přípravek na bázi succin dialdehydu pro dezinfekci a čištění nástrojů, endoskopů, ultrazvukových sond, anesteziologického příslušenství a dalších.

### Naše plus:

- Bez obsahu formaldehydu a glutaraldehydu
- Vynikající materiálová snášenlivost
- Stabilita pracovního roztoku až 14 dní
- Testován ve vysoké organické zátěži
- Vhodný pro dezinfekci podávek

### Oblast použití:

Pro manuální dezinfekci a čištění chirurgických nástrojů a přístrojů, i z citlivých materiálů. Zvláště vhodný pro endoskopy a ultrazvukové sondy (např. sondy TEE). Také vhodný pro poloautomatické a automatické dezinfektory, které pracují za studených teplot (max. pokojová teplota). Vhodný i pro UZV myčky při použití za nízkých teplot.

### Návod na použití:

**Dezinfekce a čištění nástrojů:** Nástroje vkládejte do připraveného pracovního roztoku. Po příslušné době expozice nástroje vyjměte a opláchněte. Čistící vlastnosti produktu lze značně vylepšit přidáním 1% roztoku **gigazyme®**. **Vyšší stupeň dezinfekce:** Dle doporučení výrobce nástroj rozeberte a vyčistěte. Očištěné a osušené nástroje vložte do pracovního roztoku tak, aby byly naplněny všechny duté části a nevznikaly v nich vzduchové bubliny. Po příslušné době expozice je nutné předměty vyjmout a opláchnout vodou, jejichž úroveň čistoty je stanovena příslušnou vyhláškou. Osušte a uskladněte dle schválených podmínek. Pracovní roztok je možné používat opakovaně po dobu max. 14 dní. Nekombinujte s přípravky na bázi aminu nebo KAS. **gigasept® FF new** je vhodný na nástroje z kovů, gumy, skla, porcelánu a plastů.

### Účinnost:

Baktericidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/HCV) / Papova SV40, Adeno, Polio, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní

Použití	Koncentrace	Expozice
Manuální dezinfekce a čištění nástrojů a endoskopů	2,5% 1%	15 min. 30 min.
Druhý a vyšší stupeň dezinfekce	6% 5%	6 hod. 8 hod.

Účinnost	Norma	Doba expozice									
		5 min.	10 min.	15 min.	30 min.	1 hod.	1,5 hod.	6 hod.	8 hod.	16 hod.	
Baktericidní	EN 14561			2,5%	0,75%	0,5%					
	ESBL		2%								
	DGHM			6%	4%	2%					
Levurocidní (C. albicans)	EN 14562			1%	0,5%						
	DGHM			6%	4%	2%					
Virucidní (BVDV)	DVV/RKI	1%									
Virucidní (Vaccinia)	DVV/RKI			0,5%							
Virucidní (Polyoma SV40)	DVV/RKI					4%					
Virucidní (Adeno)	DVV/RKI			2%	1%						
Virucidní (Polio)	DVV/RKI					8%	5%				
Mykobaktericidní (M. avium, M. terrae)	EN 14563			5%	4%	3%					
	DGHM			4%	3%	2%					
Tuberkulocidní (M. Terrae)	EN 14563			5%	4%	2%					
Sporocidní (B. subtilis)	EN 14347										8%
Sporocidní (C. difficile)	DGHM (EN 13704)								6%	5%	

Testováno ve vyšší organické zátěži.

# gigasept® FF new

## Složení:

100 g gigasept® FF new obsahuje následující aktivní látky:

- 11,9 g succinate acid dialdehyde (dialhedyd kyseliny jantarové)
- 3,2 g dimethoxytetrahydrofuran

## Další složení:

<5% fosfonáty, <5% anionaktivní tenzidy, <5% neionogenní tenzidy, parfém, inhibitory koroze

## Fyzikálně-chemické vlastnosti:

vzhled	zelená kapalina
hustota	1,01 g / ml / 20 °C
pH (koncentrát i 2% roztok)	cca 6,5

## Zvláštní upozornění:

Pouze pro profesionální trh. Používejte ochranné rukavice (nitril nebo butyl). Nekombinujte s přípravky na bázi aminu nebo KAS. Skladujte při teplotách do 25 °C. Nepřekračujte doporučený čas expozice.

## Logistické informace:

Název produktu	Balení	Ks v kartonu
gigasept® FF new	lahev 2l	5
	kanystr 5 kg	1

## Doba expirace:

24 měsíců

## Typ přípravku:

Zdravotnický prostředek tř. IIa [CE 0297]

## Životní prostředí:

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.



Schülke & Mayr GmbH vlastní povolení na výrobu léčiv dle GMP certifikátu.

**Air Liquide** HEALTHCARE Součást skupiny Air Liquide.

## Další informace:

Navštivte webové stránky:

[www.schulke.cz](http://www.schulke.cz)

## Výrobce:

**Schülke & Mayr GmbH**  
Robert Koch Str. 2  
22851 Norderstedt, Germany  
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0  
+49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)

## Pro individuální dotazy a požadavky:

Produktový manažer: +420 724 806 894  
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368  
Manažer prodeje SK: +421 911 288 808  
e-mail: [schulkecz@schuelke.com](mailto:schulkecz@schuelke.com)

## Distributor v ČR:

Schülke CZ, s.r.o.  
Lidická 445  
735 81 Bohumín  
Česká republika  
tel.: + 420 558 320 260  
[www.schulke.cz](http://www.schulke.cz)  
[schulkecz@schuelke.com](mailto:schulkecz@schuelke.com)

## Distributor v SR:

Schülke SK, s.r.o.  
Moštenická 3  
971 01 Prievidza  
Slovenská republika  
tel.: +421 465 494 587  
[www.schulke.sk](http://www.schulke.sk)