



Dezinfekční ubrousky, s nízkým obsahem alkoholu, určené k dezinfekci malých ploch a povrchů. Vysoká kompatibilita s materiály.

Rychlá dezinfekce
citlivých povrchů

mikrozid® universal wipes

Naše plus:

- Výborná materiálová kompatibilita
- Rychlá účinnost (norovirus do 30 sekund)
- Účinný podle EN 16615 za 1 minutu
- Dermatologicky testován
- Vysoká kvalita utěrek o rozměrech 20x20 cm
- Výborné čistící účinky

Oblast použití:

Rychlá dezinfekce malých ploch a povrchů na bázi alkoholu použitelná na všechny druhy otíratelných materiálů se zvýšeným rizikem infekce především tam, kde je vyžadována rychlá účinnost a dobrá kompatibilita s materiály, např.:

- Povrchy v okolí pacienta
- Léčebná zařízení
- Operační stoly a příslušenství
- Inkubátory
- Povrchy zdravotnických pomůcek
- Displeje, dotykové obrazovky a ovládací panely
- Nábytek a koženkové čalounění
- Citlivé povrchy

Návod na použití:

Před použitím dezinfekčních utěrek odstraňte z povrchu veškeré hrubé nečistoty. Navlhčenou utěrkou poté otřete povrch určený k dezinfekci. Ujistěte se, že balení je po vytažení potřebného počtu utěrek opět uzavřené. Výrobce garantuje účinnost produktu měsíc po otevření balení.

Účinnost:

Baktericidní, levurocidní, virucidní (Adeno, Noro, Rota, Polyoma SV 40, obalené viry – HBV, HCV, HIV)

Účinnost	Norma	Doba expozice
Baktericidní	EN13727 ²	15 s
Tuberkulocidní	EN 14348 ²	5 min
Levurocidní	EN 13624 ²	1 min
Obalené viry (včetně HIV, HBV, HCV)	DVV/RKI	15 s
Adenovirus	EN 14476 ²	15 min
Norovirus	EN 14476 ²	1 min
Norovirus	EN 14476 ¹	30 s
Polyoma SV40	DVV/RKI	15 s
Rotavirus	EN 14476 ¹	15 s

1 – nižší zátěž, 2 – vyšší zátěž

mikrozid® universal wipes

Složení:

Balení obsahuje 100 utěrek napuštěných roztokem.

100 g dezinfekčního roztoku obsahuje následující aktivní látky:

- 17,4 g Propan-2-ol
- 12,6 g Ethanol

Životní prostředí:

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Fyzikálně–chemické vlastnosti:

vzhled hustota hodnota pH	ubrousky napuštěné bezbarvou kapalinou cca. 0,95 g/cm ³ cca. 3 – 3,6
---------------------------------	---

Zvláštní upozornění:

Používejte dezinfekční přípravek bezpečně. Před použitím si prosím přečtěte etiketu. Výrobek je kompatibilní také s kovy a syntetickými materiály. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Elektrické přístroje použijte po dokonalem zaschnutí a odpaření dezinfekčního roztoku. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a slunečního záření. Teplota skladování: +15 až +25 °C. Velikost dezinfikované plochy je ovlivněna teplotou a povrchem dezinfikovaného materiálu. Po každém vytažení utěrky je nutné balení důkladně uzavřít.

Logistické informace:

Název produktu	Balení	Ks v kartonu
mikrozid® universal wipes	Softpack se 100 ubrousky, rozměr ubrousku 20x20 cm	6

Doba expirace:

24 měsíců

- Spotřebujte 1 měsíc po otevření.

Typ přípravku:

Biocidní přípravek



Schulke & Mayr GmbH vlastní povolení na výrobu léčiv dle GMP certifikátu.



Součást skupiny Air Liquide.

Další informace:

Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz

Výrobce:

Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Pro individuální dotazy a požadavky:

Produktový manažer: +420 724 806 894
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368
Manažer prodeje SK: +421 903 244 600
e-mail: schulkecz@schuelke.com

Distributor v ČR:

Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: + 420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Distributor v SR:

Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schuelke.sk